

トラキフォン

 再使用禁止

承認番号 22000BZX00297000
気管切開患者用人工鼻
管理医療機器(クラスII)

- 自発呼吸がある患者に使用する気管カニューレ用の人工鼻です。
- サククションポートから吸引カテーテルを入れることができます。
- 酸素ポートから酸素吸入ができます。
- サククションポート部分に指をあてて押し込むと発声ができます。

■仕様


製品番号	ATOS7704
重量	2.9g
寸法	奥行22×高さ28×幅38 (mm)
酸素ポート外径	4mm
一回換気量 (V _T)	50~1000mL
通気抵抗	0.36±0.15cmH ₂ O at 30L/min
死腔	9.5mL
加湿性能	20.5mg/L (V _T =500mL)
包装単位	50個/箱

■JANコード

ATOS7704	7331791002861
----------	---------------

■ご使用上の注意


- 他の加湿器又はネブライザーとの併用は絶対にしないでください。フォームが目詰まりを起こし、呼吸ができなくなります。
- 分泌物が溜まったときは直ちに新品と交換してください。分泌物が付着することにより、流量抵抗が上昇したり、閉塞したりする可能性があります。

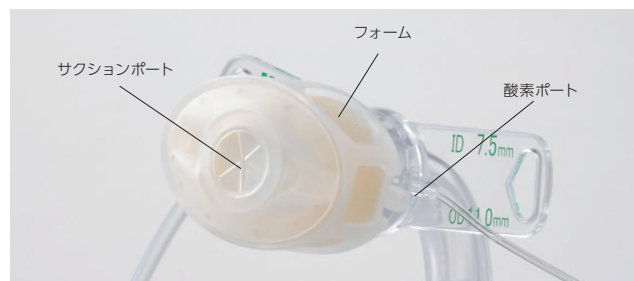

トラキフォン使用例 ※カニューレは付属していません。

発声方法

呼気時にサククションポート部分に指をあてて押し込みます。カニューレの口が塞がれますので、呼気が声門に誘導されて、発声ができます。

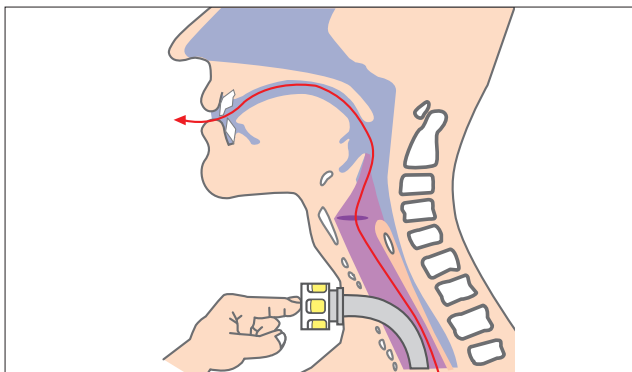


【注意】


サククションポート部分に指をあてて押し込んで、息を吐いても苦しくならないことを確認してご使用ください。

人工鼻のしくみ

- 1 呼気がフォームを通過する際に、呼気の水分がフォームに吸着されます。

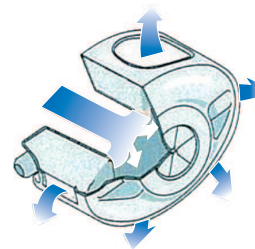

- 2 吸気がフォームを通過する際に、水分を含んだ空気を取り入れます。

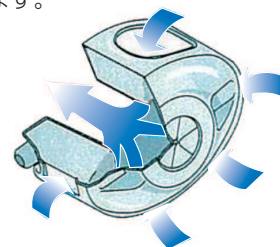

製造販売元: 株式会社アトスメディカルジャパン